




本品のご使用に際しましては
専門の介護福祉関係者等とのご相談、
お打ち合わせの上、過剰な負担・危険等の無いよう
安全にご使用下さい。

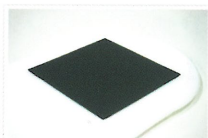

両サイズとも
裏面に滑り止めつき

仕 様

品名	トランスファーボード L型またはS型
主要材質	ポリエチレン1cm厚 白色
寸法 重量	L型 77cm×22cm×約1.5kg
	S型 67cm×22cm×約1.3kg
許容 荷重	130kg 隙間20-30cmの場合
	180kg 隙間20cm以下の場合

標準販売価格

¥12,000 (消費税は含みません。)

販売元 **株式会社 東和ポリエイト**
〒959-1286 新潟県燕市小関1317番地47
TEL (0256)66-4481
FAX (0256)66-4482
E-MAIL info@tpcplastics.co.jp

車椅子・ベッド移乗用 介護福祉用具

TRANSFER BOARD

プラスチック製
トランスファーボード
L型・S型



本品 トランスファーボードの利点

水・汚れに
強い

収納・
持ち運びに
便利

移乗者・
介護者の
負担を軽く

- 一人で可能な場合、介助者を要することなく、トランスファーボードを使用することによりご本人自身で移乗できます。
- 滑らかな表面により移乗者と介助者の負担軽減とスムーズな移乗。
- 丈夫なプラスチック製、水や汚れから清潔に保てます。
- 厚さが薄く、また周囲全体を斜めにカットしてあるため、トランスファーボードを移乗者の下に入れる作業と引き取る作業が比較的容易に可能です。
- ハンドル孔があり収納、持ち運びに便利です。

トランスファーボードの使用例

(この使用例は参考用です。個々のケースには適さない場合がありますのでご注意ください。)

移乗者自身が一人で可能な場合

- 1) 移乗者は体を横に傾け、傾けた反対の側よりトランスファーボードを尻の下に入れます。場合により、脚を組みその隙間からトランスファーボードを入れます。



移乗する前に必ず車椅子の
固定ロックを忘れないで下さい。

- 2) トランスファーボードの上に移動方向の片手をつき尻をすべらせながら移乗します。



移動が終わったら、そっと
尻の下から引き出します。

介助者が必要な場合

- 1) ベッドの端に座った状態の移乗者の体を車椅子とは反対の方へ横に傾け、トランスファーボードを移乗者の尻の下に入れます。
場合により、移乗者は脚を組み、その隙間よりトランスファーボードを入れます。
移乗する前に必ず車椅子の固定ロックを忘れないで下さい。



- 2) 介助者はトランスファーボード上に移乗者をすべらせ車椅子側に移動します。



- 3) 車椅子への移動が終わったら、移乗者の身体をまっすぐに戻します。

- 4) トランスファーボードを引き抜きます。その際、トランスファーボードを真横に引くよりやや立てて引き抜く方が容易となります。

